

**ERGONOVA**

# Organic LUX

Массажное кресло

Руководство пользователя





Поздравляем с приобретением массажного кресла Ergonova Organic LUX! Вы сделали важный шаг для своего здоровья и хорошего самочувствия. Чтобы пользоваться им как можно дольше, получить максимум от его функционала и избежать трудностей, пожалуйста, полностью прочитайте содержание этого руководства и при необходимости используйте его в будущем.

Мы оставляем за собой право внести изменения в конструкцию массажного кресла. Оно может быть изменено без предварительного уведомления. Рисунки, расположенные в инструкции по эксплуатации являются справочным материалом.

Ergonova - немецкий бренд массажного оборудования первоклассного качества. С 2009 года десятки тысяч людей улучшили качество своей жизни и ощутили преимущества продукции. Отличительные особенности оборудования Ergonova – надежность и долговечность, новейший современный функционал, удобство использования и стильный дизайн.

## Содержание

<b>ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ</b> .....	3
<b>ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ</b>	
Меры предосторожности .....	4
Наименование компонентов .....	8
Установка .....	10
Перед массажем .....	16
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	
Панель управления .....	19
Планшет .....	21
Режим голосового управления .....	29
Включение и выключение кресла .....	32
Иллюстрации к функциям .....	33
<b>ПОСЛЕ МАССАЖА</b>	
Завершение работы кресла .....	37
<b>УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ</b> .....	38
<b>УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК</b> .....	39
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b> .....	40

# ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Интеллектуальная 4D-технология обеспечит последовательный успокаивающий массаж с использованием техник разминания, надавливания, поколачивания и точечного массажа Шиацу. Воздушно-компрессионный массаж плеч имитирует сложную технику разминания, близкую к ручному массажу. Наслаждайтесь комфортом, подобным ручному массажу.
2. Кресло оснащено усовершенствованной запатентованной технологией сканирования положения и формы тела, а также функцией запоминания техник. Это обеспечивает точный и эффективный массаж для людей разного роста и телосложения.
3. Технология "Swing style" помогает устранить проблемы, связанные с сидячим образом жизни.
4. Нажатием одной кнопки на пульте управления, можно опустить спинку кресла до положения невесомости, что поможет эффективно снизить давление на позвоночник и суставы, позволяя вам испытать истинное ощущение невесомости.
5. Кресло сконструировано таким образом, что практически не требует дополнительного пространства у стены, необходимого для откидывания спинки. Спинка и каркас сиденья скользят вперед, когда вы опускаете кресло.
6. К креслу прилагается планшет с 7-дюймовым сенсорным экраном, который удобен в эксплуатации и может отображать область, технику и статус массажа в режиме реального времени, а также может настраивать программу массажа. Кресло также оснащено простой панелью быстрого доступа на подлокотнике.
7. Инновационная технология растирания совокупно с роликовым массажем, подогревом и воздушно-компрессионным массажем икр, способствует циркуляции крови, снимает боль в ногах и восстанавливает жизненные силы.
8. Подножка для ног имеет автоматическую телескопическую функцию, регулируется до 19 см, и тем самым подходит для людей разного роста.
9. Подлокотники оснащены функцией воздушно-компрессионного массажа рук, что позволяет промассировать акупунктурные точки ладони, улучшить кровообращение и снять болевые ощущения в руках.
10. Верхняя часть подлокотника оснащена USB и беспроводной зарядкой.
11. Область поясницы и бедер оснащены несколькими наборами воздушно-компрессионных подушек для попеременного сжатия в разных частях и быстрого устранения усталости.
12. Функция трансляции музыки по Bluetooth поможет повысить настроение и снять умственную усталость.
13. Интеллектуальная система голосового управления AI поможет освободить ваши руки и управлять массажем с помощью речи.
14. Нижняя часть подлокотника оснащена светодиодной подсветкой, которая поможет обеспечить вам уютную атмосферу.



# ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

## Меры предосторожности





Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ перед использованием кресла. Меры предосторожности помогут Вам использовать изделие безопасно.



Перечисленные далее несчастные случаи, вызванные неправильным использованием кресла, сопровождаются значками «ОСТОРОЖНО» и «ВНИМАНИЕ». Пожалуйста, не игнорируйте данную информацию и следуйте инструкциям в данном руководстве.

Пожалуйста, храните руководство в легкодоступном месте.

 <b>ОСТОРОЖНО</b>	Этот знак указывает на опасность для жизни.
 <b>ВНИМАНИЕ</b>	Этот знак указывает на возможность повреждения составляющих устройства или травм.

### Расшифровка символов








	Недопустимые действия		Запрещено самостоятельно ремонтировать
	Привлечение внимания пользователя		Использование шнура питания

 <b>ВНИМАНИЕ</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>• остеопороз, переломы и острые болезненные ощущения, например, растяжение связок;</li><li>• сердечные заболевания (в том числе наличие электронного кардиостимулятора и/или иных внутренних электроаппаратов);</li><li>• онкологии;</li><li>• нарушения мозгового кровообращения;</li><li>• сахарный диабет;</li><li>• искривления позвоночника;</li><li>• остеохондроз;</li><li>• беременные и недавно родившие;</li><li>• тромбоз, варикоз и кожные воспаления;</li><li>• нарушения восприятия температуры;</li><li>• солнечные ожоги, озноб, давление или физическая слабость;</li><li>• возраст старше 80 лет;</li><li>• пониженные физические, сенсорные или умственные способности.</li></ul>	Использовать устройство с осторожностью, перед использованием проконсультироваться с лечащим врачом.



## Внимание

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Во избежание застревания не оставляйте на или рядом с креслом посторонние предметы.</li><li>• Перед тем как разложить спинку или подставку для ног, проверьте, нет ли рядом/под/за ними людей, животных или других предметов.</li><li>• Если вы почувствовали дискомфорт, прекратите массаж и обратитесь к врачу.</li><li>• Будьте аккуратны во время массажа головы.</li><li>• Избегайте чрезмерно интенсивного массажа этой области.</li><li>• Будьте аккуратны во время массажа шеи.</li><li>• Избегайте чрезмерно интенсивного массажа этой области</li><li>• Устройство не предназначено для массажа живота или коленей.</li><li>• Прежде чем встать с кресла, дождитесь его полной остановки</li><li>• Не используйте кресло вместе с другими устройствами.</li><li>• Дети и домашние животные не должны играть в массажном кресле или рядом, особенно во время массажа.</li><li>• Недопустимо сидеть на спинке или подлокотниках.</li><li>• Люди с нарушением двигательной функции должны пользоваться креслом под присмотром</li><li>• Перед перемещением устройства, убедитесь, что спинка и подставка для ног находятся в исходном положении.</li></ul>	Несчастный случай/ травмы.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• При установке устройства, пожалуйста, отключите тумблер питания и выньте вилку из розетки.</li><li>• Убедитесь, что вилка полностью вставлена в розетку. Подключите кабель питания в подходящую по напряжению и конструкции розетку.</li><li>• Всегда отключайте кресло, если не используете его. Прежде чем отключить тумблер питания, выключите все массажные функции.</li></ul>	Риск поражения эл.током/пожар.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не скручивайте массажные подушки и обивку при хранении.</li><li>• Не запускайте кресло без пользователя на длительное время.</li><li>• Не оставляйте включенное устройство без присмотра.</li></ul>	Несчастный случай/ травмы.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Не используйте кабель питания, вилку или розетку если они имеют признаки повреждения.</li><li>• Не используйте напряжение отличное от номинального.</li><li>• Не используйте порванный кабель питания, не изменяйте его конструкцию, не ставьте на него тяжелые предметы, не натягивайте и не сгибайте слишком сильно.</li><li>• Если кабель питания поврежден или работает с перебоями, прекратите его использование.</li><li>• Не держите кабель питания рядом с отопительными или нагревательными приборами.</li></ul>	Риск поражения эл.током/пожар.
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Если кресло работает некорректно, сломано, облито водой, обратитесь в специализированный сервисный центр. Не допускается самостоятельный ремонт.</li><li>• Если кабель питания поврежден не ремонтируйте его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.</li></ul>	Ремонт и обслуживание.

 <b>Внимание</b>		
	<p>Во избежание поражения электрическим током, не открывайте и не ремонтируйте кресло. Кресло не предназначено для обслуживания пользователем.</p> <p>Проверяйте целостность обивки кресла перед использованием.</p> <p>Даже в случае небольших повреждений, выключите кресло и обратитесь в сервисный центр.</p>	
 <b>Осторожно</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ставьте кресло на плоскую поверхность.</li> </ul>	Во избежание падения.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Максимальное время сеанса массажа - 20 минут. По 5 минут в каждой позиции, начиная с легкого уровня интенсивности. Более продолжительный массаж в одном положении может принести дискомфорт.</li> </ul>	Во избежание неприятных ощущений в теле.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перед тем, как сесть в кресло, убедитесь, что массажные ролики находятся на своем месте.</li> <li>• Во избежание утери, падений и зажима между частями кресла пульт управления необходимо хранить в предназначенном для него кармане.</li> <li>• Убедитесь, что выключатель находится в положении OFF перед тем, как подключить кресло к сети.</li> </ul>	Для предотвращения травм.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выключите кресло перед тем, как отключить его от сети.</li> </ul>	Во избежание проблем при включении.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку.</li> </ul>	Для предотвращения короткого замыкания и риска возгорания.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что шнур питания не поврежден, на нем нет воды и мусора.</li> </ul>	Для предотвращения эл. шока в случае утечки или повреждения.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что заземляющий контакт подключен корректно. Он не должен быть загнут или отрезан.  </li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не нажимайте руками и не наступайте ногами на массажные ролики.</li> <li>• Не помещайте руки между работающими массажными роликами.</li> <li>• Не помещайте руки в щели между механизмами.</li> <li>• Не вставляйте, не садитесь и не кладите ничего на спинку, подлокотники или подставку для ног.</li> <li>• Не вставайте с кресла во время массажа.</li> <li>• Не передвигайте работающее кресло.</li> <li>• Не отключайте от сети работающее кресло.</li> <li>• Не кладите руки или голову между подставкой для ног и полом.</li> <li>• Не пользуйтесь креслом с украшением в волосах.</li> <li>• Не кладите острые предметы в задние карманы, когда делаете массаж ягодиц и бедер.</li> <li>• Не сидите на спинке и не давите на нее, когда кресло возвращается в исходное положение.</li> <li>• Не делайте массаж на участках с поврежденной кожей или в тонкой одежде, это может вызвать болезненные ощущения.</li> </ul>	Для предотвращения аварии или травм.






## Осторожно

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Берегите кресло от жары, влажности, острых предметов и агрессивных, горючих, взрывчатых средств.</li> <li>• Запрещено пользоваться в кресле электроодеялом и другими устройствами электрообогрева.</li> <li>• Берегите кресло от обогревателей и других горячих предметов.</li> <li>• Не держите кресло под прямыми солнечными лучами.</li> <li>• Не пользуйтесь креслом на открытом воздухе.</li> </ul>	Чтобы предотвратить стирание, выцветание обивки.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не используйте и не храните кресло во влажной среде, в бассейне, ванной комнате и т.п.</li> <li>• Держите кресло и пульт управления сухим.</li> <li>• Не пользуйтесь креслом, когда ваше тело влажное.</li> </ul>	Для предотвращения поражения эл. током.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Убедитесь, что кресло заземлено правильно, в противном случае возможно поражение эл. током. Если вы сомневаетесь, обратитесь к профессиональному электрику.</li> <li>• Если вилка не соответствует по конструкции розетке, не меняйте ее самостоятельно, обратитесь к профессиональному электрику или в сервисный центр.</li> </ul>	Для предотвращения поражения эл. током.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отключите кресло от сети, прежде чем заниматься чисткой.</li> <li>• Отключите кресло от сети после использования кресла.</li> <li>• Отключите питание, если есть какие-либо повреждения в системе питания.</li> <li>• Придерживайте розетку при отключении от сети, никогда не дергайте за шнур питания.</li> </ul>	Для предотвращения поражения эл. током и возгорания.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Пожалуйста, выключайте питание и отключайте кресло от сети после сеанса массажа.</li> <li>• Если произошло отключение электричества, немедленно отключите кресло от розетки.</li> </ul>	Для предотвращения несчастных случаев и травм.

## Заземление

Кресло оборудовано шнуром питания с проводом заземления. Вилку следует подключать в подходящий разъем, правильно установленный и соответствующий по конструкции.

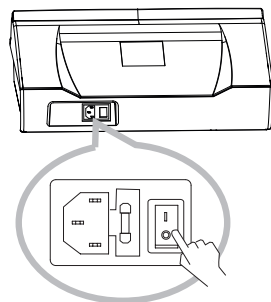

## Замена предохранителя

Если предохранитель сгорел, пожалуйста, выключите питание и отключите кресло от сети. Откройте крышку отсека предохранителя, которая находится около выключателя. Замените предохранитель таким же, как и старый, и закройте крышку. Или обратитесь к профессиональному электрику.





## ВНИМАНИЕ

Провод заземления не должен находиться в следующих местах:


- Газопровод: возможен взрыв или возгорание.
- Телефонный кабель и стержень громоотвода: может вызвать электрический шок и пожар во время грозы.
- Водопровод: провод заземления бесполезен там, где есть пластик.

# Наименование компонентов

## Внешние составляющие

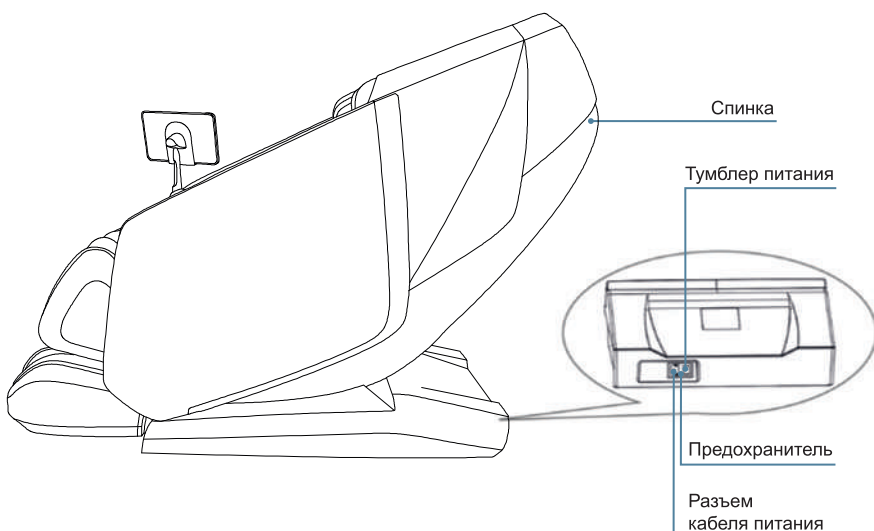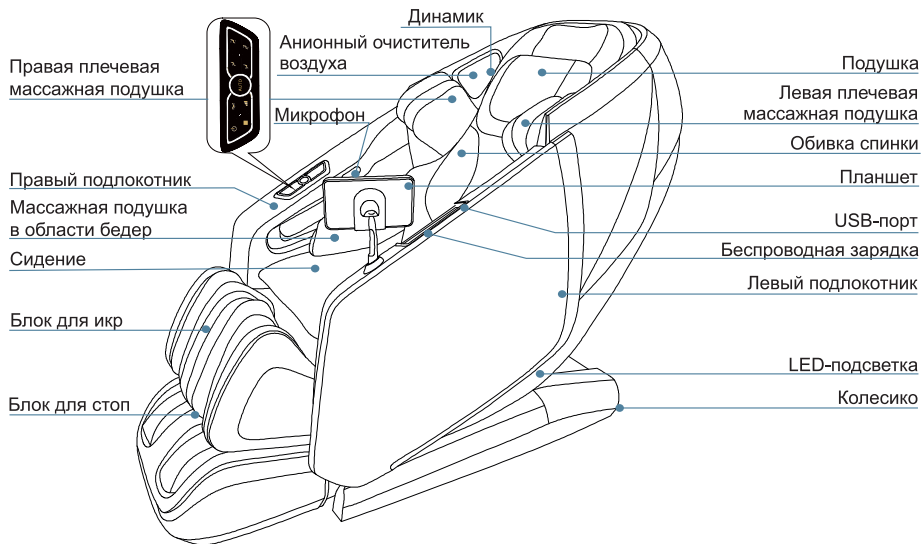


## Внутренние составляющие

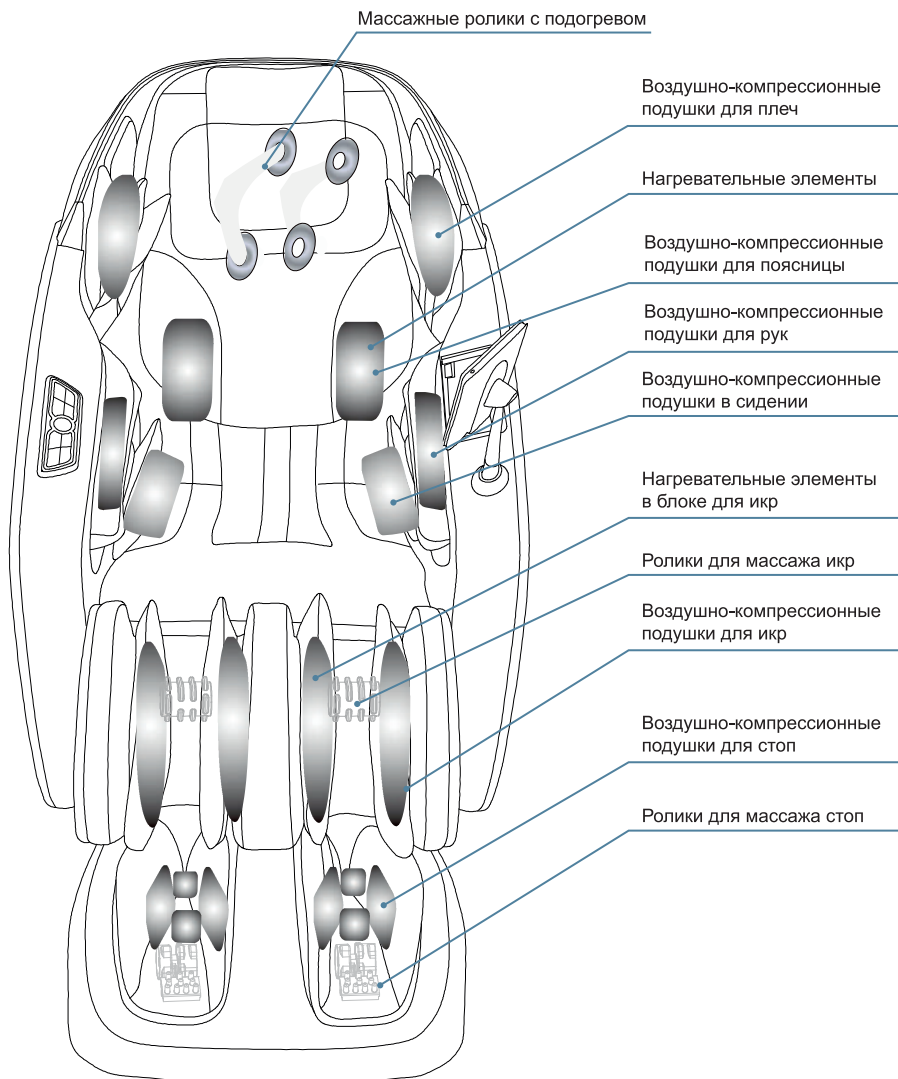


# Установка

## Шаг 1. Извлеките подставку для ног, каркас и аксессуары из упаковочной коробки

1. Обхватите руками левую и правую стороны подставки для ног и вытащите подставку для ног из коробки.

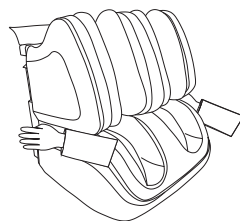

2. Вытащите из коробки комплектующие. Каркас кресла рекомендуется извлекать вдвоем.

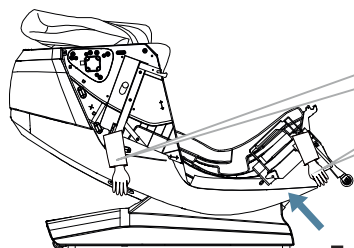


Один человек обхватывает спинку кресла, а другой держит обеими руками нижнюю часть сидения.

Основание кресла


### Примечание:

Не рекомендуется передвигать кресло за эту часть.


3. Проверьте наличие всех комплектующих по списку.

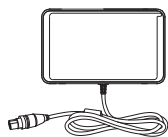


Паншет

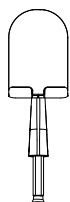


Держатель для планшета

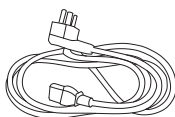

Кабель питания

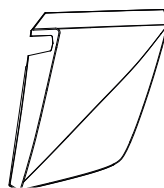


Левая крышка

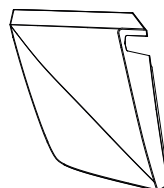

Правая крышка

4. Извлеките левый и правый подлокотники из коробки. Поставьте подлокотники ровно на стол или на пол. Будьте осторожны, чтобы не поцарапать поверхность.

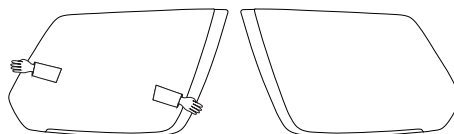


Левый подлокотник

Правый подлокотник

## Выберите место для установки

Убедитесь, что вокруг достаточно места

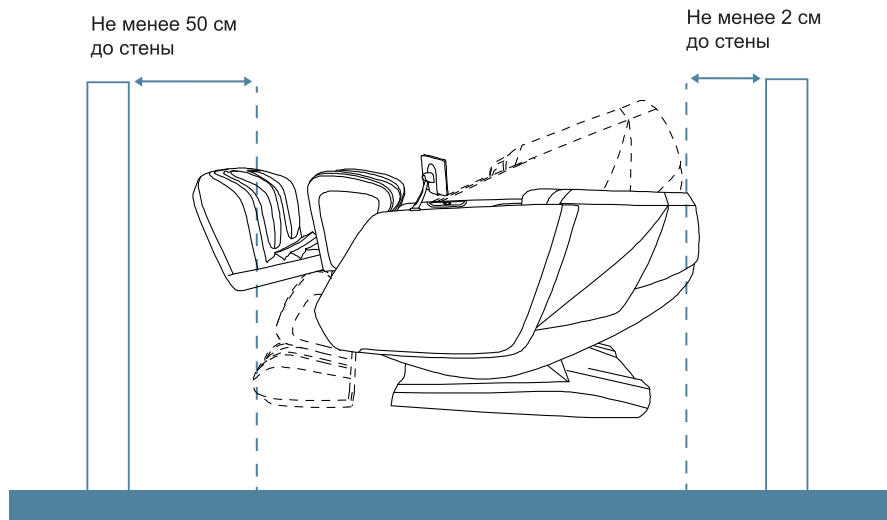

### Примечание:

Чтобы не повредить пол, рекомендуется подкладывать под кресло мягкое покрытие по типу ковра.



Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности, например, рядом с бассейном или ванной комнатой, чтобы предотвратить поражение электрическим током.




Пожалуйста, держите массажное кресло подальше от нагретых поверхностей, обогревательных приборов и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить опасность пожара или повреждения продукта.



Не устанавливайте кресло рядом с приборами и нагревательными приборами. В обратном случае может привести к выцветанию ткани, обесцвечиванию или иссыханию искусственной кожи и т.д.

## Шаг 2. Подключите массажное кресло


- 1) Вставьте один конец кабеля в отверстие в блоке питания, другой конец вставьте в розетку. Переключите тумблер на блоке питания, массажное кресло включится.
- 2) Соедините кабель питания планшета с отверстием, расположенным в левой части сидения. Плотно закрутите соединение.
- 3) Включите кресло кнопкой включения / выключения на пульте дистанционного управления планшетом и сразу же выключите. Спинка кресла поднимется, а сиденье опустится в исходное положение. После приведения кресла в исходное положение, временно положите пульт управления на сидение кресла.
- 4) После всех манипуляций, пожалуйста, выключите тумблер и отключите питание.

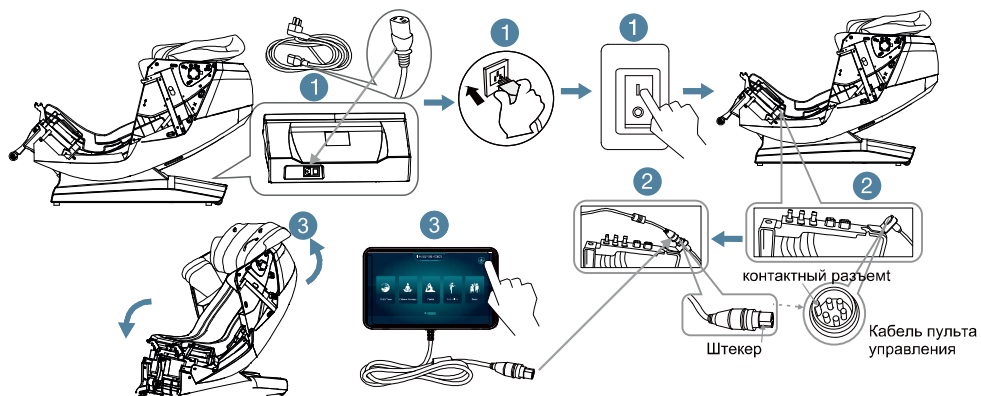

### Шаг 3. Установка левой и правой крышек плечевого массажного механизма

- 1) Приложите правую крышку к основанию кресла.
  - 2) Вставьте 6 клипс-замков и 3 отверстия, расположенных на крышке, в соответствующие 6 клипс и 3 выступа в основании кресла. Одновременно с этим вытяните жгут проводов от основания кресла, а затем с усилием надавите на крышку до полного закрытия.
  - 3) Крышка плечевого механизма установлена.
- Примечание. Жгут проводов отсутствует.

Крышка правого механизма

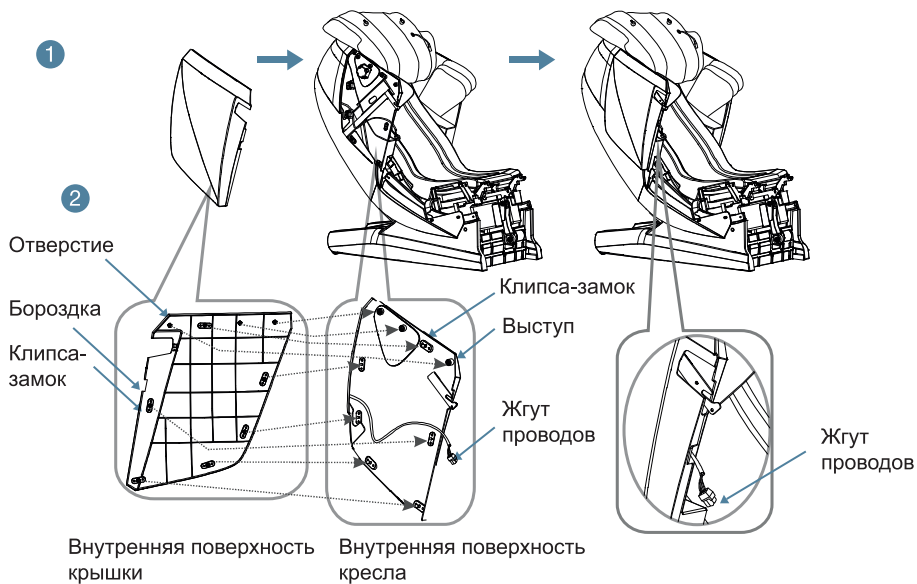


#### Шаг 4. Установка левого и правого подлокотников

- 1) Закрутите два винта М6\*20 на переднем конце железного каркаса с обеих сторон сиденья.
- 2) Установите правый подлокотник вплотную к основанию, вставьте жгут проводов плечевого механизма в отверстие в основании.
- 3) Вставьте неподвижный штифт на конце подлокотника в отверстие в плече каркаса.
- 4) Вставьте штифт в нижней части подлокотника в отверстие в боковой стороне каркаса сиденья.
- 5) Плотно вставьте воздушную трубку подлокотника в отверстие в сиденье.
- 6) Вставьте крепежную пластину на подлокотнике в отверстие в сиденье, затем закрутите один винт М6 \* 20 + большая уплотнительная прокладка крестообразной отверткой и плотно закрутите.
- 7) Установите левый подлокотник, выполните описанные выше действия, на левом подлокотнике нет жгута проводов.

#### Примечание:

Не перегибайте воздушную трубку во время установки, иначе это приведет к повреждению трубки и подушки не будут надуваться. Убедитесь, что крепежная пластина плотно вставлена, а провода надежно соединены, в противном случае подлокотник может выпасть.

2 болта М6\* 20

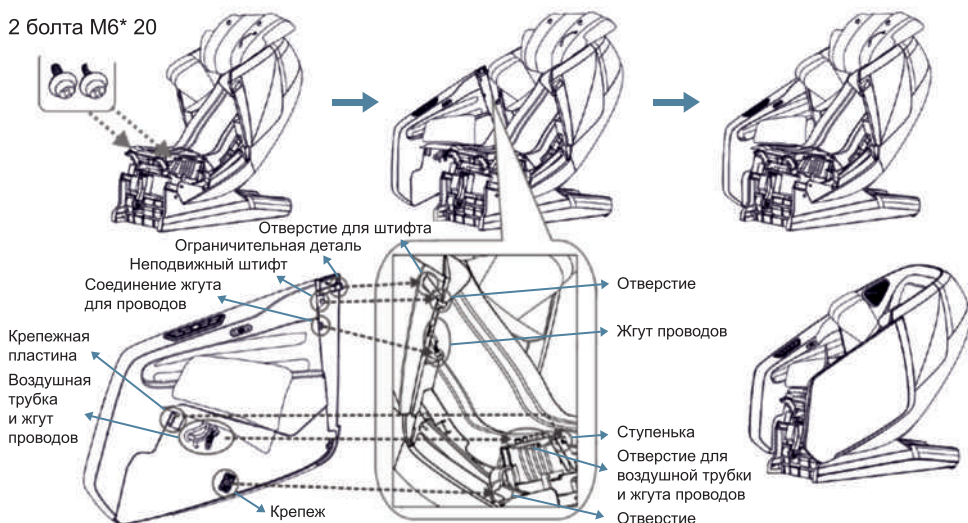


#### Шаг 5. Установка подставки для ног и стоп

- 1) Прикрутите замки для крепежного вала к сиденью.
- 2) Вставьте жгут проводов в разъем.
- 3) Прочно соедините воздушную трубку подставки для ног с воздушной форсункой основания.
- 4) Поднимите подставку для ног, вставьте вращающийся вал в подвесной замок на сидении и закройте замок.
- 5) Затяните болты.

### Примечание:


При соединении воздушной трубки и жгута проводов не следует скручивать их вместе.

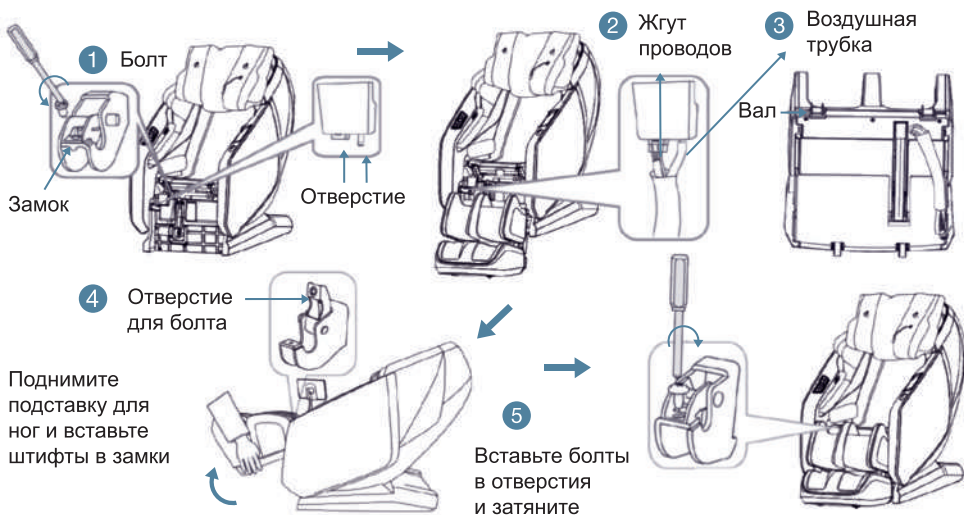

### Шаг 6. Установка держателя для планшета

1) Вставьте стержень держателя планшета в отверстие в левом подлокотнике. Вставьте его в соответствии с пазами.

2) Вставьте планшет в держатель.

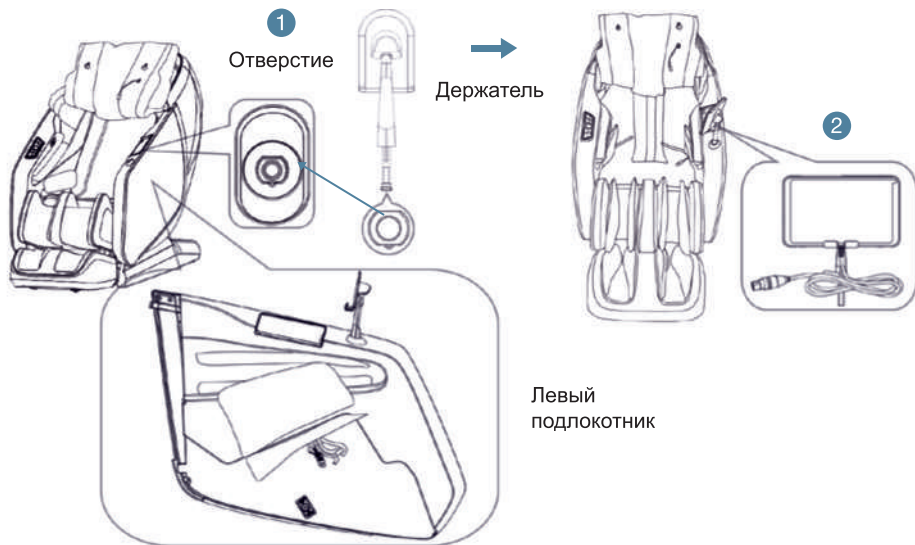




## Шаг 7. Соедините воздушную трубку с кабелем подогрева и установите обивку спинки кресла


Соедините воздушные трубки и кабель подогрева под сидением, а затем застегните молнию на обивке.

### Совет:

Для наиболее эффективного массажа, зафиксируйте нижний край подголовника вровень с ушами, прежде чем застегнуть подголовник и спинку.

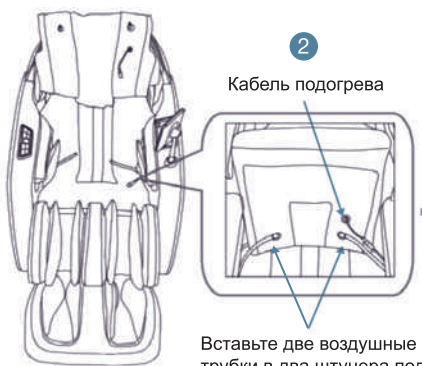

Вставьте две воздушные трубки в два штуцера под сидением.

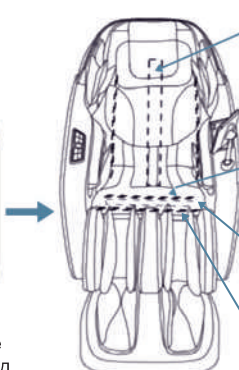

3 При установке обивки спинки кресла следует обратить внимание на следующее: середина обивки должна совпадать с серединой спинки кресла.

4 Обивка спинки соединена с подушкой сидения при помощи молнии.

5 Подушка сидения и подножка соединяются между собой липучкой.

6 Обивка спинки соединяется молнией с подножкой.


## Шаг 8. После сборки

Порядок действий после сборки кресла:

- 1) Вставьте кабель питания в отверстие блока питания (см. рисунок справа).
- 2) Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
- 3) Переключите тумблер питания из положения Выкл (0) в положение Вкл. (I)
- 4) Наслаждайтесь массажем, управляя креслом с помощью планшета или панели управления.



Вставьте кабель питания в разъем в блоке питания

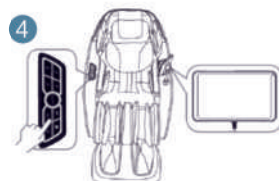

**ВНИМАНИЕ**

Убедитесь, что тумблер питания в положении Выкл, прежде чем вставить вилку в розетку

# Перед массажем



Не используйте массажное кресло в условиях повышенной влажности, например, рядом с бассейном или ванной комнатой, чтобы предотвратить поражение электрическим током.




Пожалуйста, держите массажное кресло подальше от нагретых поверхностей, обогревательных приборов и прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить опасность пожара или повреждения продукта.



Установите кресло на плоской поверхности, для предотвращения падения, шума или других непредвиденных, неприятных ситуаций.


## Проверьте пространство вокруг кресла

Убедитесь, что перед креслом нет людей, домашних животных или посторонних предметов, чтобы спинка и подставка для ног выдвигались беспрепятственно.

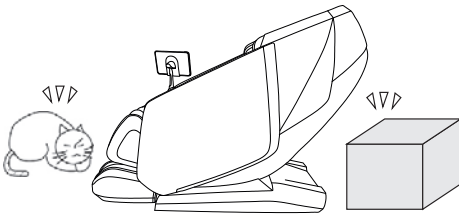


## Проверьте кабель питания и розетку

- 1) Своевременно протирайте розетку от пыли, используя сухую ткань.
- 2) Не используйте поврежденный, порванный, спутанный или перегнутый кабель.

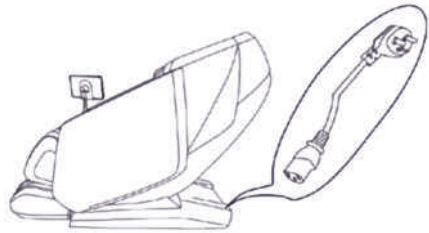


## Рекомендуемое пространство до стены.

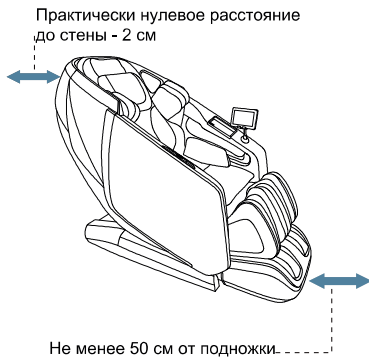

Во время опускания спинки и вытягивания подставки для ног, обратите внимание на:

1. Отсутствие людей, животных или предметов вокруг кресла.
2. Достаточно ли пространства вокруг

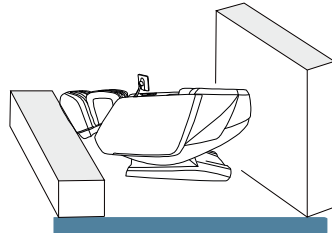



**ВНИМАНИЕ**

Во избежание несчастных случаев не перемещайте кресло во время его работы.



### Рекомендации по перемещению

Сверните провода и положите их на сиденье, чтобы не повредить во время перемещения.


Если вы уронили кресло, внутренние части могут быть повреждены.

Не катайте кресло по деревянному или другому покрытию, которое легко повредить. Для перемещения кресла необходимо не менее двух человек.

Убедитесь, что питание выключено и шнур питания не касается пола, (при перемещении важно держать кресло вертикально, чтобы избежать удара спинки об пол).

### Совет:

Поднимите кресло за подставку для ног; чтобы перенести вес на колесики. Затем, толкните кресло до нужного места и поставьте его на пол.

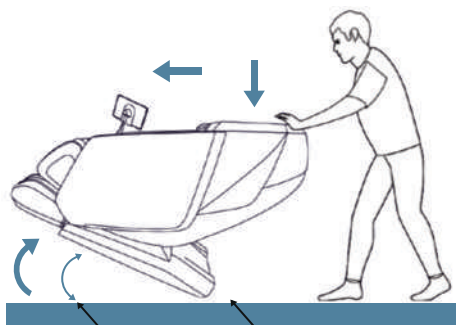

не более чем на 40°

колесико


Перемещайте кресло как показано на картинке, во избежание повреждения напольного покрытия.

Пожалуйста, не хватайтесь за подлокотники во время опускания спинки кресла для перемещения.

### Перед настройкой

Прежде чем сесть в кресло, убедитесь, что массажный ролик находится в исходном положении.

Избегайте травм, вызванных неправильным положением массажных роликов.

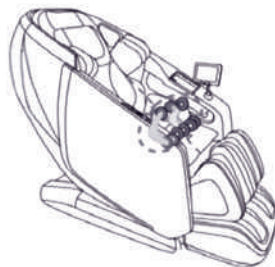

### Обнаружение акупунктурных точек

Если при определении положения акупунктурных точек произошла ошибка, ролики ставятся в среднее положение.


Для правильного определения, пожалуйста, прислонитесь спиной к креслу и откиньте голову на подушку.



Когда положение акупунктурных точек будет автоматически определено, на экране планшета появляется надпись «adjustment of shoulder height position» - «регулировка положения плеч», так вы сможете отрегулировать высоту плеч с помощью стрелок вверх и вниз на интерфейсе.


**Примечание.** Определение положения акупунктурных точек не является точным, в результате чего могут появляться неприятные ощущения от массажа.

## Совет

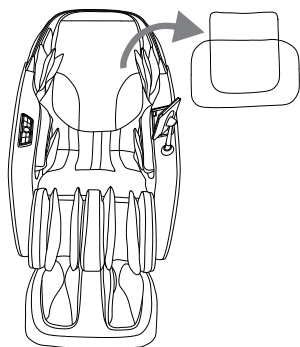

При недостаточной интенсивности массажа уберите подголовник.

Так как кресло достаточно тяжелое, оно может повредить пол в процессе долгой работы. Постелите коврик или другое мягкое покрытие для защиты пола.

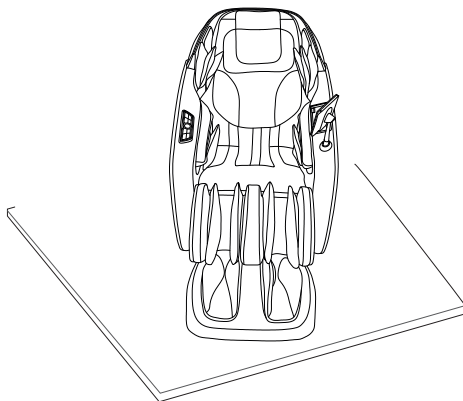

# УПРАВЛЕНИЕ

## Панель управления





1. После включения тумблера питания нажмите кнопку на 3 секунды, и массажное кресло начнет работу. Нажмите кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить кресло. Если вы находитесь в состоянии экстренной остановки, нажмите на кнопку, чтобы выключить питание.



2. Когда устройство включено, последовательное нажатие этой кнопки переключает между четырьмя режимами: невесомость, отдых, сон и возврат в исходное положение. Во всех положениях, кроме "вернуться в исходное положение", кнопка будет подсвечиваться синим цветом.



3. Нажмите в случае экстренной необходимости в остановке кресла. Кресло остановится моментально. Нажмите кнопку «Вкл/выкл», чтобы выключить кресло, другие функции не доступны.



4. В режиме ручного управления нажмите эту кнопку, чтобы отрегулировать скорость движения массажного ролика при выполнении техник. Всего 5 скоростей. На интерфейсе планшета будет отображаться соответствующий уровень скорости.



5. Когда устройство включено, после определения уровня плеч, каждое нажатие кнопки Auto переключает на другую автоматическую программу. На экране планшета загорится соответствующий индикатор и отобразится информация о программе. На выбор представлено пять автоматических программ массажа: Chinese massage , Pain Relief ,Stretch,Senior,Quick Demo.



6. После включения кресла удерживайте эту кнопку, чтобы поднять подставку для ног. Отпустите, чтобы зафиксировать выбранную позицию.



7. После включения кресла удерживайте эту кнопку, чтобы опустить подставку для ног. Отпустите, чтобы зафиксировать выбранную позицию.



8. Удерживайте эту кнопку, чтобы переместить спинку в сидячее положение и опустить подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.



9. Удерживайте эту кнопку, чтобы откинуть спинку и поднять подставку для ног. Отпустите кнопку, чтобы зафиксировать выбранную вами позицию.



#### Примечание:

Выбранные функции будут отображаться на экране планшета.

# Планшет

## Планшет

## Задняя панель планшета

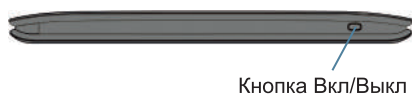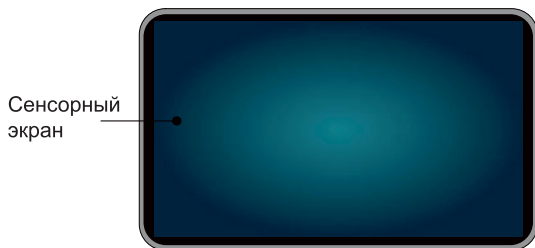

После включения питания кресла планшет включается по умолчанию и отображается экран загрузки. Подождите некоторое время, чтобы попасть на главный экран. Нажмите кнопку питания в правом верхнем углу планшета, чтобы «Включить/выключить экран».



Нажмите на этот значок, чтобы начать программу Быстрого массажа, время работы по умолчанию для этой автоматической программы составляет 8 минут.



Нажмите на этот значок, чтобы начать программу Китайского массажа, время работы по умолчанию для этой автоматической программы составляет 20 минут. Подогрев включен по умолчанию.



Нажмите на этот значок, чтобы начать программу Растяжки, время работы по умолчанию для этой автоматической программы составляет 20 минут.



Нажмите на этот значок, чтобы начать программу Облегчения боли, время работы по умолчанию для этой автоматической программы составляет 20 минут.



Нажмите на этот значок, чтобы начать программу массажа для пожилых людей, время работы по умолчанию для этой автоматической программы составляет 20 минут. Подогрев включен по умолчанию.